



正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。  
また、お読みになった後は大切に保管してください。

## ■製品外観／各部名称


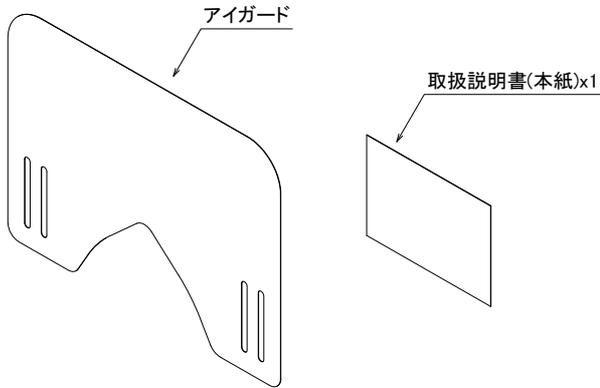


## ■ご使用方法


1.図のように、マスクの紐をアイガードの左右スリットへ、通してください。紐を通す位置によって、フィット感が変化します。お好みに合わせて、調節してください。

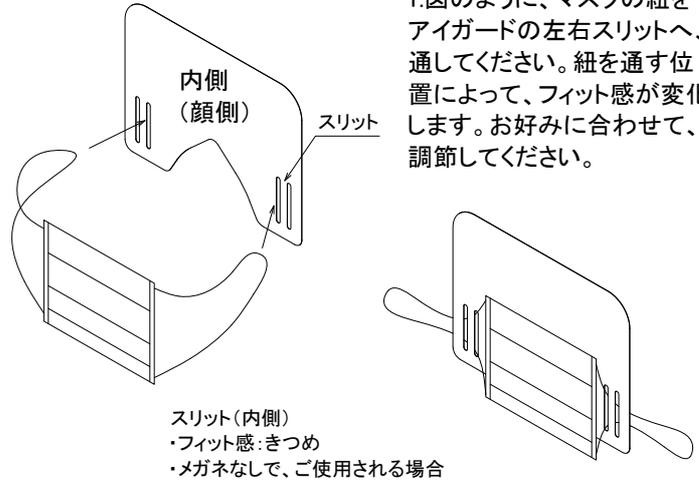

## ■ご使用に必要な物(別途ご購入ください)

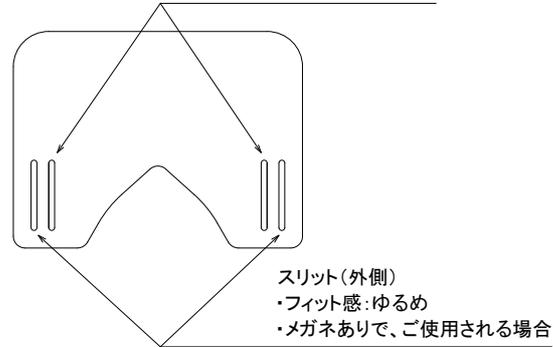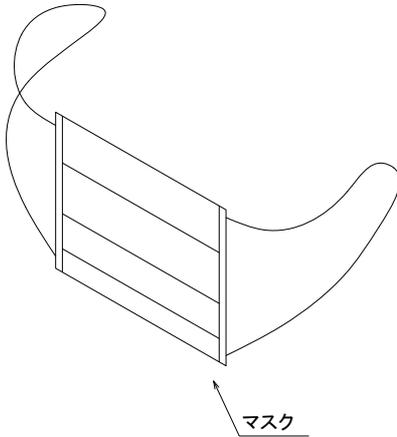

2.図のように、マスクの紐を左右の耳に取り付けて完成です。  
必要に応じて、アイガードの位置を調節してください。

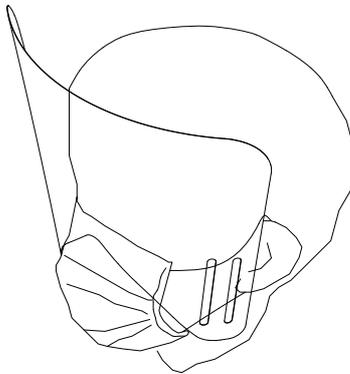

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

人身への危害と財産への損害を未然に防ぐため、注意事項を記しています。  
ご購入の際には必ずお守りいただきますよう、お願いいたします。

## ⚠️ ご使用について

- 本製品は樹脂製(PET)です。
- 鋭利なもので触れないでください。表面に傷が付く恐れがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 高温になると変形する恐れがありますので、50℃以下の場所でご使用ください。
- 直射日光のあたる場所に設置しないでください。
- マスクの紐などで、スリットを強く引張らないでください。破損の原因になります。
- 使用中に血液や体液で汚染された場合は、新しいものと交換してください。

## 廃棄について

- ご使用後は、各施設の取り決めに基づいて、廃棄してください。