


フェイスシールド (PETベルトタイプ) 取扱説明書


取り扱い上の注意

- アルコール洗浄は可能ですが、経年による劣化のおそれがあります。使い捨てを推奨いたします。
- うすいプラスチックでケガをしないよう、十分注意して使用してください。
- ベルトを無理に引っ張るとシールドが破損するおそれがあります。


内容物

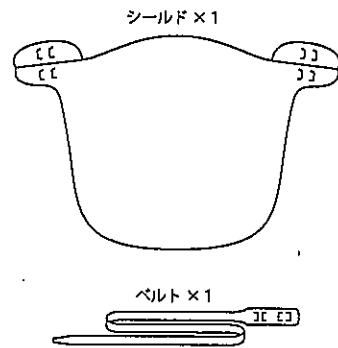


1 シールドを折る。

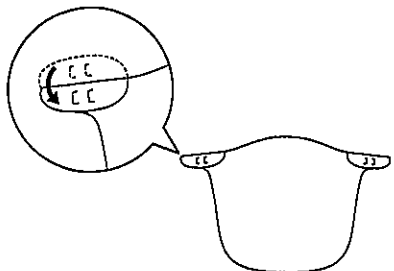


2 ベルトを折る。 (小口の耳への当たりをやさしくするためです)

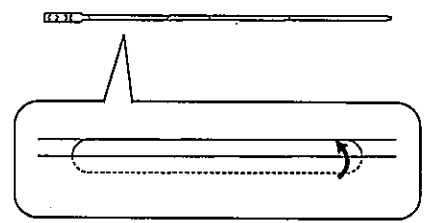


3 ベルトの折り目を下向きにし、シールドにベルトを通す。

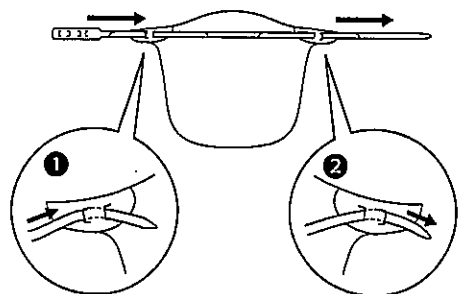


4 ベルトをつなぐ。

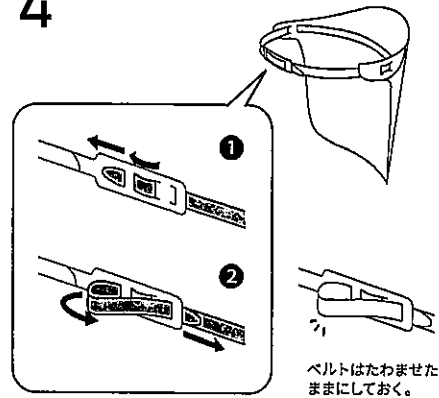


5 組み立て完了

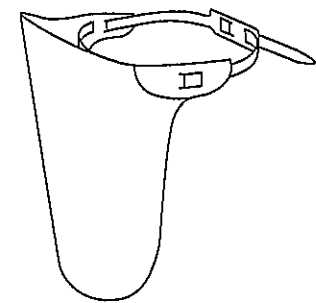


6 頭に装着し、ベルトを引っ張り固定する

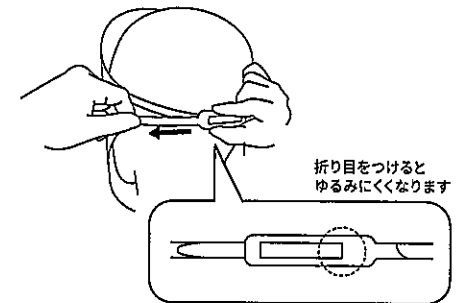

7 シールドのたわみは装着後でも調整できます。

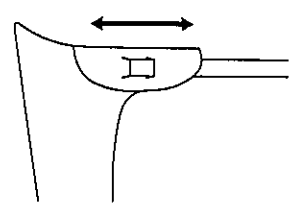

8 装着完了

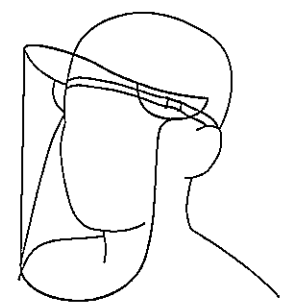

こちらから組み立て動画をご覧になれます。

<材質>
シールド：リサイクルA-PET
ベルト：リサイクルA-PET

<寸法>
・シールド
厚み：0.3mm 横幅：260mm 縦幅：400mm
・ベルト
厚み：0.2mm 長さ：780mm 幅：8~9mm

<重量>
シールド：27g
ベルト：3g
総重量：30g

日本製

フェイスシールド 取扱説明書

こちらから組み立て動画を
ご覧になれます。▶




取り扱い上の注意

- アルコール洗浄は可能ですが、経年による劣化のおそれがあります。使い捨てを推奨いたします。
- うすいプラスチックでケガをしないよう、十分注意して使用してください。
- 紐を無理に引っ張るとシールドが破損するおそれがあります。


内容物

シールド×1

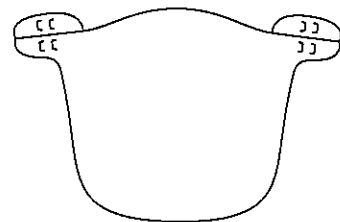


平ひも×1


ストッパー×1

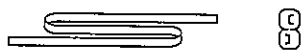


1 シールドを折る。

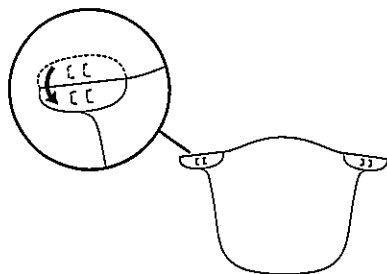


2 シールドに平ひもを通す。 反対側も同様に。

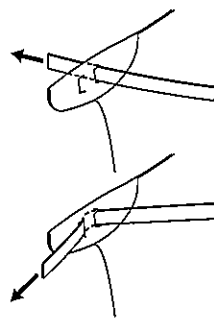


3 平ひもを引き出し、シールドをたわませる。

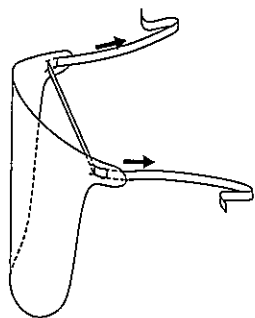


4 ストッパーに平ひもを通す。

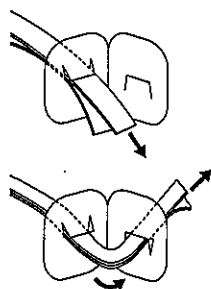


5 平ひもを引き出す。

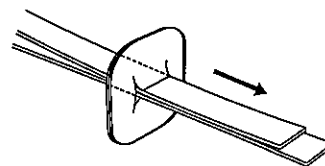


6 組み立て完了

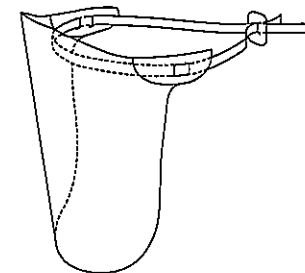


7 ストッパーを押さえながら 平ひもの長さを調整する。 (ストッパーを使わず結んでも固定できます)

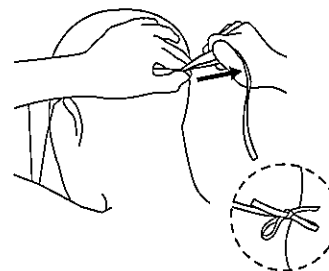

8 装着完了

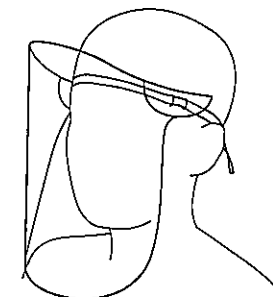

9 シールドのたわみは 装着後でも調整できます。

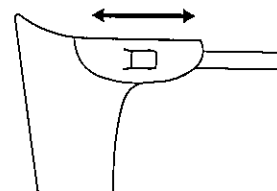

<材質>
シールド：リサイクルA-PET
ストッパー：リサイクルA-PET
平ひも：ポリウレタン、ポリエステル

日本製

<寸法>
厚み：0.3mm
横幅：260mm
縦幅：400mm
平ひも：長さ900mm~1000mm * 幅8~9mm

<重量>
シールド部+ストッパー：27g
平ひも：7g
総重量：34g